



Produkty wspomagające karmienie piersią

WZOROWANE NA NATURZE



Wyłączny przedstawiciel na Polskę firma



Karmienie piersią jest idealne dla mamy i dziecka



Jest to wyjątkowy czas kiedy oboje są sobie szczególnie bliscy i wytwarza się między nimi intymna więź.

Karmiąc dziecko własnym pokarmem, mama przekazuje mu wszystkie niezbędne witaminy i minerały oraz przeciwciała, warunkujące prawidłowy rozwój.

Karmienie piersią chroni przed chorobami zarówno mamę jak i dziecko i pomaga w utrzymaniu dobrego zdrowia na dłużej.

Karmienie piersią jest również praktyczne, gdyż mleko mamy ma zawsze odpowiednią temperaturę i jest gotowe do spożycia w każdej chwili.

Nic dziecku nie zastąpi mleka mamy

Mleko matki zawiera wszystkie niezbędne składniki i przeciwciała zapewniające zdrowy rozwój dziecka. Głównym celem firmy Medela jest wyposażenie matek we wszystkie produkty potrzebne do tego, aby mogły jak najdłużej karmić piersią.

Różnorodność modeli odciągaczy pokarmu została dostosowana do różnego rodzaju sytuacji:

- separacja mamy i dziecka
- dzieci przedwcześnie urodzone
- niedobór pokarmu
- nawał pokarmowy
- bolesność brodawek

oraz do indywidualnych wymagań karmiących kobiet.




Odciągacze pokarmu najnowszej generacji

PERFEKCYJNE POŁĄCZENIE NATURY I NAJNOWSZEJ TECHNOLOGII

Zaprojektowane, by odciągać pokarm prawie tak dobrze jak niemowlę.

Podczas ssania piersi niemowlęta pobierają pokarm w dwóch fazach: na początku ssą szybko i lekko, aby pobudzić wypływ mleka. Następnie ssanie staje się wolniejsze i głębsze, aby możliwie szybko uzyskać jak najwięcej mleka.

System dwufazowy 2-Phase Expression zastosowany w najnowszych odciągaczach Medela odwzorowuje naturalny rytm ssania niemowlęcia i oferuje możliwość odciągania pokarmu w taki właśnie sposób.

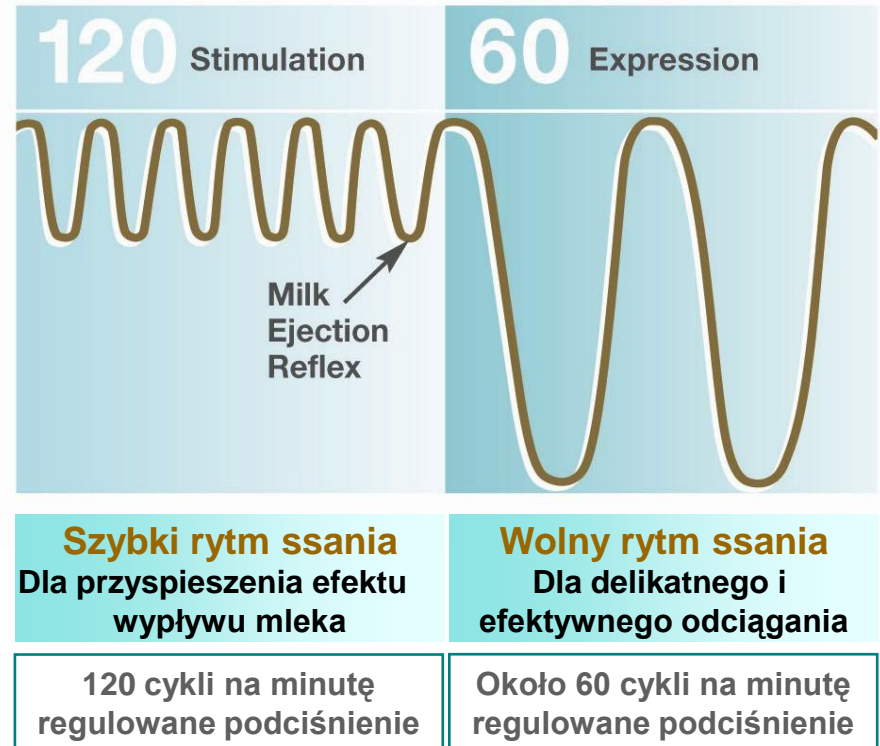



Symphony

2-fazowy profesjonalny laktator elektryczny, najnowszej generacji, przeznaczony do pracy w szpitalach i wypożyczalniach.

Dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii umożliwia mamom odciąganie pokarmu w sposób najbardziej zbliżony do natury.

Nie tylko naśladuje naturalny rytm ssania dziecka, ale również odwzorowuje fazę ssania właściwego. To gwarantuje otrzymanie największej ilości mleka.

Zalety:

- wszystkie części końcówek osobistych można sterylizować w autoklawie
- mała ilość części pompy oraz zaokrąglony kształt umożliwiają odpowiednią dezynfekcję w warunkach szpitalnych
- karta magnetyczna, indywidualna dla pojedynczej pacjentki, na której matka może zapisać czasy trwania poszczególnych faz odciągania, optymalnych dla siebie



Swing

**2-fazowy laktator elektryczny,
najnowszej
generacji.**



Nie tylko naśladuje naturalny rytm ssania dziecka, ale również odwzorowuje fazę ssania właściwego. To gwarantuje otrzymanie największej ilości mleka.

Rozpoczynamy odciąganie pokarmu od fazy I, a gdy mleko zaczyna płynąć mama wybiera fazę wypływu właściwego.

**Zapewnia maximum komfortu i wydajności,
dzięki swoim unikalnym zaletom:**

- wysoce efektywny
- proces odciągania zbliżony do fizjologii
- miękka, silikonowa, masująca wkładka w lejku umożliwia lepszą stymulację otoczki i brodawki
- poręczny, nowoczesny i cichy

Laktator **Swing** jest dobrym rozwiązaniem w przypadku odciągania okazjonalnego, jak również częstego, np. przy długotrwałej separacji matki od dziecka.

Można go używać przy użyciu 4 baterii typu AA lub po podłączeniu do sieci.

Harmony

**2-fazowy laktator ręczny,
najnowszej generacji.**

Jest to najprostszy w obsłudze odciągacz ręczny, składa się z najmniejszej liczby części składowych, spośród wszystkich dostępnych na rynku odciągaczy.

Jest dobrym rozwiązaniem w przypadku odciągania okazjonalnego (2-3 razy dziennie), gdy mama np. wraca do pracy, a po powrocie chce karmić dziecko bezpośrednio piersią.

Dzięki temu, że odciąganie pokarmu jest zbliżone do fizjologicznego procesu ssania piersi, skuteczność odciągacza **Harmony** jest porównywalna ze skutecznością odciągaczy bateryjno-sieciowych.



Zapewnia komfort i wydajność dzięki swoim unikalnym zaletom:

- wysoka efektywność
- proces odciągania zbliżony do fizjologii
- **w zestawie dwa rodzaje lejków**: lejek standard oraz lejek miękki z silikonową, masującą wkładką, umożliwiającą lepszą stymulację otoczki i brodawki
- łatwość zmiany pozycji rączki (zmiany faz)
- lekki i wygodny



Pump in Style Advanced



**2-fazowy laktator elektryczny
najnowszej generacji,
w nowoczesnym plecaku,
przeznaczony dla aktywnych,
pracujących mam karmiących**

Jest wyposażony we **wszystkie niezbędne akcesoria** do codziennego odciągania pokarmu:

- **2-fazowa pompa elektryczna**
- **podwójny zestaw** do odciągania pokarmu, z miękkimi lejkami
- **torba termoizolacyjna** z wkładem chłodzącym, wyprofilowanym w taki sposób, aby pomieścić 4 butelki z odciągniętym pokarmem
- **2 dodatkowe butelki** do przechowywania i zamrażania pokarmu

Jest idealny do częstego, regularnego stosowania.

Lactina Electric Plus

Profesjonalny elektryczny laktator, przeznaczony do pracy w szpitalach i wypożyczalniach, z pojedynczym i podwójnym zestawem do odciągania pokarmu.



- **Lactina** może pracować praktycznie bez przerwy, a jej cicha praca umożliwia korzystanie na Oddziale Noworodkowym, często wśród śpiących maluszków. **Końcówki osobiste**, które używają mamy odciągające pokarm **nadają się do sterylizacji wysokotemperaturowej (autoklawowania)**.
- **Moduł Lactina** powinien znajdować się na **każdym Oddziale** Położniczo-Noworodkowym i być dostępny dla pacjentek leżących w szpitalu oraz przy każdym szpitalu (lub przynajmniej w każdym mieście) powinno się zorganizować **wypożyczalnię** tych laktatorów, dla matek z problemami laktacyjnymi, wychodzących z dzieckiem do domu.
- **Lactina** powinna być również **podstawowym narzędziem pracy dla konsultanta** lub doradcy laktacyjnego



Przy pomocy **Lactiny** mama może **odciągać pokarm z jednej piersi** (pojedyncza końcówka osobista) jak również **z obu piersi jednocześnie** po zastosowaniu dwóch końcówek osobistych.

Moduł elektryczny Lactina

jest idealny w przypadkach konieczności długotrwałego, regularnego odciągania pokarmu:

- **poród wczesny** lub inne problemy wynikające z **okresowej separacji** matki od dziecka, skutkujące koniecznością wielokrotnego odciągania pokarmu w ciągu dnia i w nocy (**relaktacja**)
- **niedobory mleka**
- **słabe przybieranie** dziecka na wadze
- inne problemy laktacyjne, występujące u mamy, która ma przy sobie dziecko i karmi piersią, a **problem laktacyjny powinien być rozwiązany w przeciągu kilku do kilkunastu dni.**



Mini Lactaset

to podstawowy odciągacz ręczny z regulacją siły ssania.

- Idealny do okazjonalnego odciągania pokarmu, kiedy mama wciąż bardzo intensywnie karmi piersią.
- Bardzo często kupowany przez mamy w ciąży, ze względu na możliwość dalszej jego rozbudowy.

Lactaset

jest podstawową wersją końcówki osobistej, współpracującej z modułem elektrycznym **Lactina** oraz jednocześnie stanowi kompletny **odciągacz ręczny z płynną regulacją siły ssania**.



- Mając **Lactaset** kobieta może podłączyć go do **Lactiny** (w szpitalu lub w domu, jeżeli moduł został wypożyczony)
- Jak już nie korzysta z **Lactiny** używa **Lactasetu** jako odciągacza ręcznego
- Jeżeli zaistnieje potrzeba częstszego odciągania pokarmu **Lactaset** można rozbudować do wersji bateryjno-sieciowej (**Mini Electric**), dokupując silniczek i zasilacz.

Końcówka sterylna :




Nadaje się do autoklawowania w warunkach szpitalnych.

Zalety:

- niski koszt zakupu
- produkt gotowy do użycia (sterylny)
- gdy mama nie ma już potrzeby korzystania z **Lactiny** istnieje możliwość rozbudowy:

1. do wersji odciągacza ręcznego (**Mini Lactaset**) – w tym celu trzeba dokupić **tłok**
2. do wersji bateryjno-sieciowej (**Mini Electric**)
– w tym celu trzeba dokupić **silniczek i zasilacz** (zestaw uzupełniający)

- Jest częścią osobistą dla mamy korzystającej z **Lactiny**, która jest wyposażona w **tłok kompletny**.
- Ten zestaw powinien być dostępny w **szpitalach** dla mam leżących na oddziale położniczym lub w **wypożyczalniach**, gdzie będzie dostępna **Lactina** z **tłokiem**.

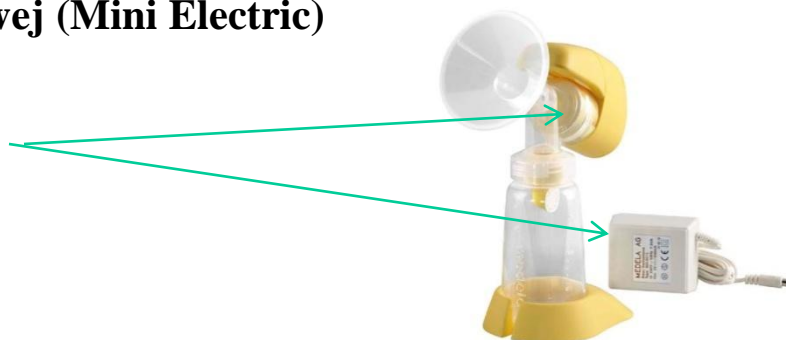



Mini Electric

Osobisty, w pełni automatyczny odciągacz bateryjno-sieciowy

Zalecany w przypadkach konieczności kilkukrotnego odciągania pokarmu w ciągu dnia:

- poród wczesny
- separacja matki od dziecka
- relaktacja
- powrót mamy do pracy

Można go używać po podłączeniu do sieci lub będąc poza domem lub w podróży przy użyciu 2 baterii typu AA.

Mini Electric został uznany, przez renomowane światowe czasopisma przeznaczone dla matki i dziecka, za najlepszy osobisty odciągacz bateryjno-sieciowy.

Doskonale sprawdza się w przypadku, gdy wiemy, że konieczność odciągania pokarmu przedłuży się. Wtedy długotrwałe wypożyczenie elektrycznego modułu **Lactina** może okazać się zbyt kosztowne.

Mini Electric Plus

Osobisty odciągacz bateryjno-sieciowy z możliwością odciągania pokarmu z jednej piersi z obu piersi jednocześnie.

Posługiwanie się odciągaczem z podwójną końcówką skraca czas odciągania pokarmu oraz doskonale pobudza proces laktacji.

Zalecane w przypadkach konieczności kilkukrotnego odciągania pokarmu w ciągu dnia:

- poród wczesny
- ciąża bliźniacza
- separacja matki od dziecka
- relaktacja



W przypadku gdy długotrwałe wypożyczenie elektrycznego modułu **Lactina z dwiema końcówkami osobistymi** może okazać się zbyt kosztowne, doskonałym rozwiązaniem będzie model Mini Electric Plus, który będzie dla mamy odciągaczem osobistym, który może być podłączony do sieci lub pracować na dwóch bateriach LR14.

Lejki do laktatorów Medela

1. Lejek standardowy do odciągacza

- z tworzywa sztucznego, bezpośrednio przylegająca do piersi. Jego podstawowa wersja stanowi jedną część, a średnica lejka wynosi **24 mm**



Ten typ lejka występuje w następujących modelach odciągaczy Medela:

- **Mini Lactaset,**
- **Lactaset,**
- **Końcówka sterylna Lactasetu**
- **Mini Electric,**
- **Mini Electric Plus**
- **Symphony**

Jeżeli mama zdecyduje, że jest jej potrzebny lejek o innej średnicy powinna zakupić **łącznik standard** i dobrać komfortową dla siebie średnicę **lejka standard PersonalFit** lub **lejek miękki SoftFit**

Lejki do laktatorów Medela

2. Lejek standardowy dzielony do odciągacza – PersonalFit

- z tworzywa, element bezpośrednio przylegający do piersi, wraz z łącznikiem stanowi integralną część odciągacza. Różne rozmiary umożliwiają mamom dobranie odpowiedniej wielkości lejka do piersi, co zwiększa komfort i wydajność odciągania pokarmu.



Lejki PersonalFit występują w 5-ciu rozmiarach:

- **S** średnica otworu **21** mm
- **M** średnica otworu **24** mm
- **L** średnica otworu **27** mm
- **XL** średnica otworu **30** mm
- **XXL** średnica otworu **36** mm



Lejki do laktatorów Medela

3. Lejek miękki do odciągacza – SoftFit

- z miękkiego, elastycznego silikonu, element bezpośrednio przylegający do piersi, wraz z łącznikiem stanowi integralną część odciągacza. Średnica lejka wynosi **24 mm**.

Miękki lejek w trakcie odciągania pokarmu, w komfortowy sposób masuje pierś i otoczkę brodawki. Imituje sposób w jaki usta dziecka masują pierś w trakcie ssania.



W lejek miękki SoftFit wyposażone są następujące modele odciągaczy:

- **Harmony**
- **Swing**
- **Pump In Style Advanced**

Do każdego lejka standardowego PersonalFit, posiadającego łącznik standard można dokupić miękką końcówkę lejka.



Lejki do laktatorów Medela

4. Lejek Komfort

- przeznaczony do piersi bardzo wrażliwych lub w przypadkach nawału pokarmowego. Dzięki niemu odciąganie pokarmu jest jeszcze bardziej delikatne.




Można go stosować ze wszystkimi rodzajami odciągaczy Medela w zastępstwie lejka standardowego.

Połączenie odciągacza Medela naśladującego naturalny fizjologiczny cykl ssania dziecka i lejka Komfort jest idealnym odwzorowaniem mechanizmu ssania piersi przez dziecko.

Do kupienia osobno w komplecie z żółtym zaworkiem i membranką.

Zaworek i membranka

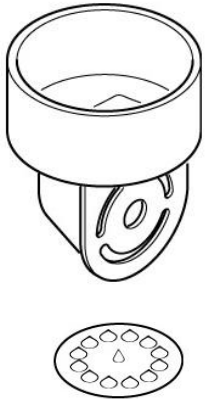

Po użyciu odciągacza wszystkie elementy należy rozmontować, a następnie dokładnie umyć wodą z mydłem lub płynem do mycia naczyń i wypłukać pod bieżącą wodą. Potem wygotować przez 5 minut we wrzątku.

Szczególną uwagę należy zwrócić na **dokładne oddzielenie od siebie i umycie** membranki i zaworka. Jeżeli części te nie zostaną dobrze odłuszczone za pomocą detergentu, pozostający tłuszcz stanie się pożywką dla bakterii, a powiększająca się z dnia na dzień warstewka brudu spowoduje mniejszą efektywność odciągacza, a nawet całkowicie uniemożliwi korzystanie z niego lub go uszkodzi.


Po myciu podczas umieszczania membrany na zaworku należy zwrócić uwagę czy:

- krawędzie zaworka nie są wyszczerbione
- powierzchnia zaworka nie jest pokryta nalotem minerałów

Powyższe sytuacje **mogą skutkować obniżeniem siły ssania** odciągacza oraz **pieniem się mleka** w butelce, podczas odciągania pokarmu.

Gdy jeden z tych elementów jest uszkodzony należy wymienić go na nowy, aby odciągacz pracował poprawnie.

Zaworek lub membranę można dokupić osobno lub też w formie zestawu: **2 zaworki i 6 membran.**

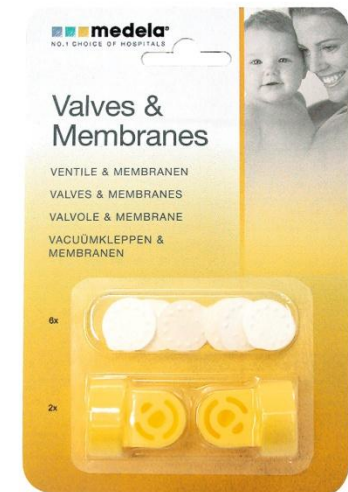

Butelki do zbierania, przechowywania i zamrażania pokarmu.

Butelki firmy Medela wykonane są z polipropylenu i **nie zawierają** szkodliwego dla zdrowia dzieci **bisfenolu A** (substancji występującej w butelkach wykonanych z poliwęglanu).



Butelki z przezroczystego polipropylenu są standardowym wyposażeniem **odciągaczy osobistych**. W warunkach domowych można je wygotowywać.



Butelki wykonane z mlecznego polipropylenu znajdują się w zestawach przeznaczonych do **użytkowania w warunkach szpitalnych**, ze względu na możliwość ich wielokrotnej sterylizacji. Można je poddawać procesowi sterylizacji parowej wysokotemperaturowej, czyli autoklawowaniu.

Torebki na pokarm

Przeznaczone do odciągania i przechowywania pokarmu w lodówce bądź zamrażarce.



- podwójne ścianki zapewniają bezpieczne i długie przechowywanie pokarmu w lodówce i zamrażarce
- pojemność 150ml, na każdej torebce podziałka
- wygodne zamknięcie strunowe
- miejsce na opisanie przechowywanego pokarmu (szczególnie istotne przy wcześniakach)
- samoprzylepny pasek umożliwiający właściwe przymocowanie torebki do lejka dowolnego odciągacza firmy Medela

	Temp. pokojowa	Torba chłodząca	Lodówka	Zamrażalnik w lodówce	Głębokie mrożenie
Świeżo odciągnięty pokarm	do 12 h	Do 24 h	2-5 dni 4°C	2 tyg. -10°C	3 m-ce -14°C 6-12 m-cy -18°C
Rozmrożony pokarm	Nie przechowywać	Nie przechowywać	24 h	Nigdy nie zamrażać pokarmu powtórnie	Nigdy nie zamrażać pokarmu powtórnie

*Nehring-Gugulska M.: „Warto karmić piersią”, wyd.II

Torby chłodzące

Eleganckie, wygodne, posiadają miejsce na odciągacz oraz specjalną „mini lodówkę” wyłożoną folią termoizolacyjną, wyposażoną w odpowiednio wyprofilowany wkład chłodzący i dodatkowo w 2 butelki do przechowywania pokarmu.

Umożliwiają bezpieczny transport odciągniętego mleka nawet w czasie upałów.



Wersja sportowa



Wersja elegancka City Style

SNS

System Wspomagający Karmienie

Jest to rewelacyjny produkt, który umożliwia jednocześnie:

- pobieranie pokarmu z piersi (tyle ile jest)
- pobudzanie produkcji mleka u mamy,
- naukę ssania piersi
- dokarmianie dziecka odciągniętym mlekiem mamy lub sztuczną mieszanką (dzięki temu maluch nie denerwuje się przy piersi, że "nic nie leci", a z kolei "śpioch" wypije trochę mleka II fazy zanim zaśnie)



Zestaw ten jest najczęściej polecany w poradniach laktacyjnych, jako produkt wspomagający karmienie przy odbudowywaniu laktacji, po długich okresach separacji mamy od dziecka lub w przypadku, gdy konieczne jest długotrwałe dokarmianie dziecka, a mama nadal chce karmić piersią.

Umożliwia karmienie piersią również w przypadkach dzieci urodzonych przedwcześnie, niewykształconego odruchu ssania, adopcji dziecka lub dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia.



Zestaw łyżeczki

Ułatwia karmienie dziecka w przypadkach gdy niemożliwe jest karmienie dziecka bezpośrednio z piersi.

Nie wpływa negatywnie na prawidłowe odruchy ssania, gdyż w ogóle nie wymaga od dziecka ssania.



Delikatna, specjalnie ukształtowana łyżeczka idealnie pasuje do ust małego dziecka, posiada też zabezpieczenie przed nadmiernym wypływem. Silikonowa "łyżeczka" napęlnia się mlekiem z butelki po naciśnięciu.

Produkt ten jest przeznaczony do karmienia niemowląt starszych (od 3 miesięcy). Najlepiej aby karmić malucha odciągniętym wcześniej mlekiem mamy.

Zestaw smoczka


Produkt medyczny specjalnego przeznaczenia

Do karmienia noworodków, wcześniaków i niemowląt, urodzonych z rozszczepem wargi i podniebienia lub z innymi utrudnieniami w żywieniu.



Jego zaletą jest możliwość **wyboru wielkości szczeliny** na silikonowym smoczku, co wpływa na szybkość wypływu mleka i umożliwia dozowanie wypływającego pokarmu przez osobę karmiącą dziecko.

Dzieciom, które mają problem ze ssaniem można pomóc w nauce korzystania z zestawu: wystarczy delikatnie nacisnąć, a następnie zwolnić nacisk smoczka, żeby wpuścić niewielką ilość mleka dziecku do buzi.

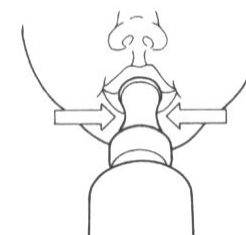

Kubeczek do karmienia

Zalety produktu:

- Wykonany z tworzywa miękkiego (polipropylen medyczny)
- Specjalnie ukształtowany dziobek ułatwia oparcie go na ustach dziecka
- 5 ml skala pozioma i ukośna
- produkt jednorazowego użytku, ale dopuszcza się jego dezynfekcję i sterylizację wysokotemperaturową (autoklawowanie)



Podając pokarm niemowlęciu za pomocą kubeczka należy zwrócić uwagę aby nie wlewać mleka bezpośrednio do gardła., gdyż dziecko może się zachłysnąć.

Po napełnieniu kubeczka opieramy go o usta dziecka. Delikatnie przechylamy kubeczek tak by spływający pokarm dotknął ust dziecka. Dziecko wyczuwając mleko zacznie spijać je samo.

Aby dowiedzieć się więcej o takim sposobie karmienia niemowląt należy skontaktować się z najbliższą poradnią laktacyjną



Pipetka nastrzykawkowa

Wykonana z miękkiego i giętkiego silikonu. Nakłada się ją na końcówkę strzykawki.

W sytuacjach gdy karmienie noworodka bezpośrednio z piersi jest utrudnione np. w przypadku wcześniaków urodzonych przed 36-tym tygodniem ciąży, dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia lub dzieci z Zespołem Downa, mleko kobiece można podawać w małych ilościach przez strzykawkę.



Założenie pipetki na końcówkę strzykawki (10 ml lub 20 ml) umożliwia uczenie dziecka ssania metodą „na palcu”, przy jednoczesnym podawaniu pokarmu w sposób delikatny i bardziej bezpieczny.



Nauka ssania „na palcu” powinna być przeprowadzana pod ścisłą kontrolą specjalisty, najlepiej pediatry lub konsultantki laktacyjnej, która dokładnie wytłumaczy i opowie o tej technice.



ochronne

Zabezpieczają bolące lub popękane brodawki przed dalszymi podrażnieniami, przyspieszając proces gojenia.

Odpowiednia cyrkulacja powietrza daje komfort termiczny

formujące

Wkładki formują spłaszczone lub wklęsłe brodawki. **Naciskając delikatnie na otoczkę sutka powodują stopniowe wysunięcie brodawki, co przygotowuje ją do karmienia.**

Wkładki można nosić w czasie ciąży (rozpoczynając od 1-2 godzin dziennie), a po porodzie kontynuować noszenie w przerwach między karmieniami (najlepiej 30 min. lub godzinę przed podaniem piersi).

zbierające

Osłony zbierają wypływające samoczynnie mleko, chroniąc ubranie. Można je zakładać na drugą pierś w trakcie karmienia lub nosić pomiędzy karmieniami.

Osłony piersi



Lanolina PureLan 100



Jeżeli problem bolących
brodawek nasila się, należy
skonsultować się z poradnią
laktacyjną.

Najbardziej naturalny produkt spośród kremów i maści obecnie znajdujących się na rynku. Zalecany dla kobiet w ciąży i w trakcie karmienia piersią.

Nie zawiera konserwantów i sztucznych dodatków.

100% czystej lanoliny (tłuszczu owczego)

- **Silne właściwości nawilżające i natłuszczające.** PureLan 100 zapewnia bolącym i popękanym brodawkom naturalną nawilżającą i natłuszczającą barierę, która chroni je przed utratą wilgoci
- **Wyraźnie przyspiesza gojenie** zmacerowanych, popękanych brodawek u mam karmiących
- **Nie wymaga zmywania przed karmieniem**
- **Bardzo wydajny**

Nakładki kontakt



Silikonowe osłony na brodawki matki karmiącej, stosowane w sytuacjach gdy utrudnione jest bezpośrednie uchwycenie brodawki przez dziecko.

Specjalny kształt „z wycięciem” umożliwia kontakt dziecka ze skórą matki w czasie karmienia.

Nakładki kontakt powinny być stosowane tylko przez krótki czas i tylko zgodnie z zaleceniem lekarza lub konsultantki laktacyjnej.

Zdarza się, że brodawki są nadwrażliwe, bolesne, popękane lub płaskie. Wtedy mamy karmiące odczuwają dyskomfort przez kilka pierwszych minut karmienia piersią lub w ogóle nie są w stanie karmić. **Można wtedy zastosować nakładki Kontakt pamiętając jednak, aby używać ich tylko przez krótki czas.**

Sposób chwytania i ssania przez nakładki typu „kapturek” różni się od mechanizmu ssania piersi, więc długotrwałe stosowanie nakładek może doprowadzić w konsekwencji do zaburzeń prawidłowego odruchu ssania.

Wkładki laktacyjne



Jednorazowe wkładki laktacyjne

Super nowoczesne, jednorazowe wkładki laktacyjne dla matek karmiących chronią przed niekontrolowanym przeciekaniem mleka przez ubranie. Zapewniają wygodę i komfort noszenia. Każda wkładka znajduje się w osobnym opakowaniu, co pozwala na większą higienę przechowywania.



Wkładki laktacyjne wielorazowego użytku

Wchłaniają mleko wyciekające z piersi, chroniąc ubranie. Pokryte atrakcyjną koronką, delikatne, dobrze przepuszczające powietrze. Odpowiedni kształt zapewnia wygodę noszenia. Dostosowane do wszystkich rozmiarów piersi. Nadają się do prania w każdego rodzaju pralce.



Należy pamiętać, że substancje naturalne, zawarte w tych ziołach tylko wspomagają proces laktacji, nie są zaś jego podstawową przyczyną.. Aby utrzymać odpowiedni poziom laktacji, piersi mamy muszą być regularnie i prawidłowo opróżniane.

Mieszanki ziołowe przygotowane specjalnie dla potrzeb matek karmiących piersią

- wsparcie laktacji
- dostarczenie potrzebnych witamin, mikro- i makroelementów
- ułatwienie trawienia matce i dziecku

Herbatka Bocianek

Działa mlekopędnie, ułatwia trawienie, przeciwdziała kolkom jelitowym i wzdęciom u dzieci, relaksuje, pobudza przemianę materii, bogate źródło witaminy C, A, B i K, żelaza i innych soli mineralnych

Kawka Bocianek

Poprawia przemianę materii, działa osłonowo na przewód pokarmowy, działa mlekopędnie, ułatwia trawienie, przeciwdziała kolkom jelitowym i wzdęciom u dzieci.